

دستورالعمل گندزدایی وسایل و تجهیزات مراقبتی بیمار به تفکیک بخش ها

(همراه با تجهیزات مورد نیاز)

تهیه و تنظیم :

اعظم جوادی (کارشناس بهداشت محیط)

اکرم اکبرزاده (کارشناس کنترل عفونت)

نام بخش : عفونی ۲				
تعداد تخت : تخت				
تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده. سایا سبت HP، سایا سبت اچ ای ، توریو (سورفیس) ، محلول High level (نانو سیل D6) ، فامو کلین ، آب شیرین ، قرص زاوول پارت ، ظرف مدرج و دیش				
وسیله یا تجهیزات	سطح خطر	روش روئین گندزدایی	زمان گندزدایی	ملاحظات
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ یا فامو کلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی و یا دستمال کشی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ یا فامو کلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی و یا دستمال کشی
سطوح (در ، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ یا فامو کلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	ابتدا و اشینگ مطابق دستورالعمل و در صورت وجود آلودگی خونی و ۰۰ بلافاصله مطابق دستورالعمل گندزدایی شود .
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ یا فامو کلین ۴٪	روزانه	
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه ور گردد سپس آبکشی . و یا استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده،	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی . بلافاصله پس از استفاده. محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توریو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توریو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده	
کاف فشار سنج گوشه معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضامن آن با اسپری سریع الاثر توریو دستمال کشی گردد	پس از استفاده	
ماسک آموبگ	غیر بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توریو دستمال کشی.	پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ یا فامو کلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	در صورت آلوده شدن ترالی ابتدا آنرا تمیز و اچ پی ۲٪ برای گندزدایی استفاده کنید .
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توریو گندزدایی گردد .	بلافاصله پس از هر بار استفاده	جهت پر کردن از آب مقطر استریل استفاده شود
صندلی	غیر بحرانی	با سایا سبت HP ۲٪ یا فامو کلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	در صورت وجود آلودگی ابتدا پاکسازی و یا شستشوی و سپس گندزدایی شود
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ یا فامو کلین ۴٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود .	بلافاصله پس از هر بار استفاده	نخ تی به صورت ۲ هفته یکبار تعویض شود

کف زمین	غیر بحرانی	سسسوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد یا فاموکلین ۴٪	در هر سیمت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول ساپاسپت 2% HP یا فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شتسشو شود و با وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود .	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده
		مرتباً شیر آلات سرویس بهداشتی با سرکه و ویا وایتکس ۱۰ درصد گندزدایی گردد	

نام بخش: جراحی اطفال				
تعداد تخت: ۱۸				
تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده فامو کلین . سایاسپت HP، سایا سپت اج ای ، توربو ، دستمال تنظیف ، آب شیرین . نانوسیل دی ۶ ، قرص زاوول پارت ، ظرف مدرج و دیش				
وسيله يا تجهيزات	سطح خطر	روش روتین گندزدایی	زمان گندزدایی	ملاحظات
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی ویا دستمال کشی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی ویا دستمال کشی
سطوح (در ، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	ابتدا واشینگ مطابق دستورالعمل ودر صورت وجود آلودگی خونی و ... بلافاصله مطابق دستور العمل گندزدایی شود .
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اج پی ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه	
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی . ویا استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ الیتر آب	بلافاصله پس از استفاده..	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی بلافاصله پس از استفاده. محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل پک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	
نیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده	
کاف فشار سنج گوشه معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده	
ماسک آموبک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	در صورت آلوده شدن ترالی ابتدا آنرا تمیز و بعد از توربو(اسپری الکی آماده به مصرف) یا اج پی ۲٪ فاموکلین ۴٪ برای گندزدایی استفاده کنید
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توربو گندزدایی گردد .	بلافاصله پس از هر بار استفاده	
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	در صورت وجود آلودگی ابتدا پاکسازی و یا شستشوی و سپس

نخ تی به صورت ۲ هفته یکبار تعویض شود	در هر شیفت	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود .	غیر بحرانی	تی (زمین شوی)
	در هر شیفت	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد .	غیر بحرانی	گف زمین
	روزانه	محلول سایاسپت ۲% HP فاموکلین ۴٪/سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	غیر بحرانی	برانکارد و ویلچر
	پس از استفاده	با آب و پودر شستشو شود و با وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	غیر بحرانی	وان حمام - روشویی
مرتباً شیر آلات سرویس بهداشتی با سرکه و یا اچ پی ۲٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود .	غیر بحرانی	سینک دستشویی
	پس از استفاده	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گندزدایی شود	غیر بحرانی	نوالت فرنگی

نام بخشی : اتاق عمل	تعداد : ۴ اتاق	تجهیزات مورد نیاز : مواد گندزدایی کننده فاموکلین و سایاسپت HP ، توروبو . سورفیس ، سایاسپت HI ، اوبا ، فانو سیل d6 ، دستمال تنظیف ، آب شیرین، دیش غوطه ورسازی ، الکل ، قرص ژاول پارت ، ظرف مدرج	
وسيله یا تجهیزات	سطح خطر	روش روتین گندزدایی	زمان گندزدایی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ - فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در ، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ - فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP 2%	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
برونکوسکوپ ، لاپاروسکوپ ، سیستوسکوپ	نیمه بحرانی	شستشوی با محلول شوینده آنزیماتیک نیم درصد و به مدت ۵ دقیقه و سپس غوطه وری در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه و آبکشی با آب مقطر و خشک کردن	بلافاصله پس از استفاده
مانیتور	غیر بحرانی	صفحه با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه
دستگاه بیهوشی	نیمه بحرانی	دستمال کشی با اچ پی ۲٪ - فاموکلین ۴٪	روزانه
چراغ سیالینیک	غیر بحرانی	دستمال کشی با اچ پی ۲٪ - فاموکلین ۴٪	روزانه
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و یا استفاده از یک قرص ژاول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده. محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی و سپس اتو کلاو	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توروبو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توروبو نمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنح گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضامن آن با اسپری سریع الاثر توروبو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آمبویک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توروبو دستمال کشی.	پس از استفاده
ترالی دارو - میز مایو و ...	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ پرسیدین ۲٪	روزانه قبل از شروع کار
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توروبو گندزدایی گردد .	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ - فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی ربا بودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪ و یا وایتکس ۲ درصدو غوطه ور شود .	در هر شیفت
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و بودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد . پ فاموکلین ۴٪	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2% یا فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی وضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و بودر شستشو شود و با وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده

سینک دستسویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود .	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده

نام بخش: آسم و آلرژی		تعداد تخت: ۲۰ تخت		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایاسپت HP، فامو کلین سایا سپت اج ای، توریو	
تخت بیمار		غیر بحرانی		دستمال نظیف، آب شیرین، قرص ژاول پارت، ظرف مدرج و دیش. محلول نانو سیل دی ۶ - محلول High level سورفیس	
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	تخت بیمار	غیر بحرانی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	سطلوح (در، دیوار و ۰۰۰)	غیر بحرانی
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	مانیتور	غیر بحرانی
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	صفحه با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اج پی ۲٪ فامو کلین ۴٪	روزانه	ساکشن	نیمه بحرانی
وسایل یک (پنس - قیچی و ۰۰)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	اتوسکوپ	غیر بحرانی
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده	کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی
انوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توریو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده	ماسک آمبویک	نیمه بحرانی
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توریو دستمال کشی گردد	پس از استفاده	توالی دارو	غیر بحرانی
ماسک آمبویک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده	نبولایزر	غیر بحرانی
توالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	صندلی	غیر بحرانی
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توریو گندزدایی گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده	تی (زمین شوی)	غیر بحرانی
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	کف زمین	غیر بحرانی
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اج پی ۲٪ ویا وایتکس ۲درصد غوطه ور شود.	در هر شیفت	برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اج پی ۲ درصد. فاموکلین ۴٪	در هر شیفت	وان حمام - روشویی	غیر بحرانی
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2% فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه	سینک دستشویی	غیر بحرانی
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو شود ویا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده	توالی فرنگی	غیر بحرانی
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده		
توالی فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده		

نام بخشی : اورژانسی		تعداد تخت : ۱۴ تخت		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایا سبت HP، سایا سبت اچ ای ، توربو (سورفیس) ، دستمال تنظیف ، آب شیرین ، نانو سیل دی ۶ ، قرص ژاول پارت ، ظرف مدرج و دیش . فامو کلین .	
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	غیر بحرانی	لاگر (کمد کنار تخت)
سطوح (در ، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	غیر بحرانی	سطلوح (در ، دیوار و ...)
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فامو کلین ۴٪	روزانه	غیر بحرانی	مانیتور
دستگاه شوک	غیر بحرانی	بعد از هر بار مصرف با اسپری توربو کلیه ضامن آن گندزدایی گردد	بعد از هر بار استفاده کلیه قسمتها پاک و تمیز گردد	غیر بحرانی	دستگاه شوک
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	غیر بحرانی	ظرف مایع دستشویی
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	نیمه بحرانی	مخزن مانومتر
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی ویا استفاده از یک قرص ژاول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده . محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.	نیمه بحرانی	ساکشن
وسایل یک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	بحرانی	وسایل یک (پنس - قیچی و ...)
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده	بحرانی	تیغه لارنگوسکوپ
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده	غیر بحرانی	اتوسکوپ
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضامن آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده	غیر بحرانی	کاف فشار سنج گوشی معاینه
ماسک آمیوبک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربو دستمال کشی.	پس از استفاده	نیمه بحرانی	ماسک آمیوبک
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سبت HP ۲٪	روزانه قبل از شروع کار	غیر بحرانی	ترالی دارو
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمت های دستگاه با توربو گندزدایی گردد .	بلافاصله پس از هر بار استفاده	غیر بحرانی	نبولایزر
صندلی	غیر بحرانی	با سایا سبت HP ۲٪ دستمال کشی شود	روزانه	غیر بحرانی	صندلی
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی رابا پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود .	در هر شیفت	غیر بحرانی	تی (زمین شوی)
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد . فامو کلین ۴٪	در هر شیفت	غیر بحرانی	کف زمین
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایا سبت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه	غیر بحرانی	برانکارد و ویلچر
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شنشو شود ویا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده	غیر بحرانی	وان حمام - روشویی
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود .	پس از استفاده	غیر بحرانی	سینک دستشویی
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده	غیر بحرانی	توالت فرنگی

نام بخش: PICU		تعداد تخت: ۷ تخت	
تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایا سپت HP، سایا سپت اچ ای، توریو (سورفیس)، دستمال تنظیف، آب شیرین، نانوسیل دی ۶، قرص ژاول پارت، ظرف مدرج و دیش. فاموکلین			
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در، دیوار و ۰۰۰)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
ونتیلاتور	نیمه بحرانی	ابتدا قطعات آن با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی گردد. سطوح خارجی با سایا سپت اچ پی ۲ درصد و یا توریو	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و یا استفاده از یک قرص ژاول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل پک (پنس - قیچی و ۰۰)	بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توریو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توریو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضامن آن با اسپری سریع الاثر توریو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آمیوبگ	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و گردد و سپس آبکشی	پس از استفاده
توالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایا سپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توریو گندزدایی گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایا سپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی رابا پودر شسته سپس در محلول فاموکلین ۴٪ اچ پی ۲٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	پس از استفاده
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد.	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایا سپت HP 2٪ فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی وضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو شود و یا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده

نام بخش : NICU		تعداد تخت : ۶ تخت	
تجهیزات مورد نیاز: کندز دایی کننده سایاسپت HP، سایا سپت اج ای، توربو (سور فیس)، دستمال تنظیف، آب شیرین نانوسیل دی ۶، قرص زاوول پارت، ظرف مدرج و دیش. فاموکلین.			
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در، دیوار و ۰۰۰)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
ونتیلاتور	نیمه بحرانی	ابتدا قطعات قابل باز شدن آن با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی گردد. سطوح خارجی با سایا سپت اج پی ۲ درصد ویا توربو	بلافاصله پس از ترخیص بیمار توجه به دستور سازنده دستگاه الزامیست
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اج پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه
تشک نوزاد	غیر بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس با سایاسپت اج پی ۲ درصد فاموکلین ۴٪ کندز دایی گردد	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
انکوباتور	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا شستشوی با آب و دترجنت و همراه سایر قسمتها پس از پاکسازی کندز دایی با اج پی ۲ درصد فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate (سایا سپت اج ای ۲ درصد) به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی ویا استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ الیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل گاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ۰۰)	بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمامن آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آمبویک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توربو کندز دایی گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی رابا بودر شسته سپس در محلول اج پی ۲٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	پس از استفاده
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و بودر و کندز دایی با محلول اج پی ۲ درصد.	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2٪ فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و بودر شستشو شود ویا وایتکس ۱۰٪ کندز دایی گردد	پس از استفاده
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و بودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و بودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد کند ز دایی شود	پس از استفاده

نام بخش: آنکولوژی		تخت: ۱۵ تخت		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایاسپت HP، سایا سپت اچ ای، توربو (سورفیس)، دستمال نظیف	
تخت بیمار		غیر بحرانی		دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار		
سطوح (در، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی		
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید		
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه		
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate و یا (سایا سپت اچ ای ۲ درصد) به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده		
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و یا استفاده از یک قرص زاول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.		
وسایل یک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده		
تیغه لارنگوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده		
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده		
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضامن آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده		
ماسک آمبوبگ	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده		
توالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار		
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توربو گندزدایی گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده		
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ دستمال کشی شود	روزانه		
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با بودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	پس از استفاده		
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و بودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد فاموکلین ۴٪	در هر شیفت		
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت ۲% HP فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه		
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و بودر شستشو شود و یا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده		
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و بودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده		
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و بودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده		

نام بخش : نوزادان		تعداد تخت : ۱۲ تخت	
تجهیزات مورد نیاز: کندز دای کننده سایاسپت HP، سایا سپت اچ ای، توریو، دستمال تطهیر، آب شیرین، نانوسیل دی ۶، قرص زاوول پارت، ظرف مدرج و دیش			
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره درها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
تشک نوزاد	غیر بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس با سایاسپت اچ پی ۲ درصد فاموکلین ۴٪ کندز دای گردد	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪	روزانه
انکوباتور - کات نوزاد	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا شستوشو با آب و دترجنت و همراه سایر قسمتها پس از پاکسازی کندز دای با اچ پی ۲ درصد	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستوشو ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate (سایا سپت اچ ای ۲ درصد) به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و با استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate ^۱ به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توریو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
انوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توریو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توریو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آموبک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توریو دستمال کشی.	پس از استفاده
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪	روزانه قبل از شروع کار
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمت های دستگاه با توریو کندز دای گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده
شیر دوش	بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دترجنت شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمت های دستگاه با توریو یا سورفیس	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	در هر شیفت
کف زمین	غیر بحرانی	شستوشو با آب و پودر و کندز دای با محلول اچ پی ۲ درصد.	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2% فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو ویا وایتکس ۱۰٪ کندز دای گردد	پس از استفاده

پس از استفاده	از محلول وایتکس و بودر برای نظافت استفاده شود .	عبر بحرانی	سینک دستشویی
پس از استفاده	ابتدا با آب گرم و بودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	غیر بحرانی	توالت فرنگی

نام بخش: نفرولوژی تعداد تخت: ۲۲ تخت تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایاسپت HP، ساپا سیت اچ ای، توربو (سورفیس)، دستمال نظیف، آب شیرین، نانوسیل دی ۶، قرص زاوول پارت، ظرف مدرج و دیش فامو کلین ۴ درصد

تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی ویا دستمال کشی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی ویا دستمال کشی
سطوح (در، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره در بها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	ابتدا واشینگ مطابق دستورالعمل و در صورت وجود آلودگی خونی و ... بلافاصله مطابق دستورالعمل گندزدایی شود.
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه	
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی ویا استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل پک (پنس - قیچی و ...)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده	
تیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده	
کاف فشار سنج گوشه معاینه	غیر بحرانی	گوشه معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده	
ماسک آمبوپک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده	در صورت عدم استفاده بصورت هفتگی
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	در صورت آلوده شدن ترالی ابتدا آنرا تمیز و بعد از توربو(اسپری الکلی آماده به مصرف) یا اچ پی ۲٪ برای گندزدایی استفاده کنید
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توربو گندزدایی گردد	بلافاصله پس از هر بار استفاده	
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	در صورت وجود آلودگی بلافاصله آلودگی گندزدایی شود
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	در هر شیفت	نخ تی به صورت ۲ هفته یکبار تعویض شود
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد.	در هر شیفت	
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2% فاموکلین ۴٪ طح آغشته کرده	روزانه	

و دستمال کشی و ضد عفونی گردد				
	پس از استفاده	با آب و پودر شتسو شود و با وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	غیر بحرانی	وان حمام - روشویی
مرتباً شیر آلات سرویس بهداشتی با سرکه و یا اچ پی ۲٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود .	غیر بحرانی	سینک دستشویی
	پس از استفاده	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گندزدایی شود	غیر بحرانی	توالت فرنگی

نام بخشی : درمانگاه - ۱ کو		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایاسیت HP، سایا سیت اچ ای ، توربو، دستمال تنظیف ، آب شیرین ، رانوسیل دی ۶، قرص ژاول پارت، ظرف مدرج و دیش ، فامو کلین	
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسیت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در ، دیوار و ۰۰۰)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسیت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪	دستگیره در بها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و یا استفاده از یک قرص ژاول پارت در ۱۰ لیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ۰۰)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آمبوبگ	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربودستمال کشی.	پس از استفاده
نبولایزر	غیر بحرانی	قطعات قابل باز شدن ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی می گردد سایر قسمتهای دستگاه با توربو گندزدایی گردد.	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسیت HP ۲٪ فامو کلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با بودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ فامو کلین ۴٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود .	در هر شیفت
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و بودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد .	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسیت ۲% HP فامو کلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و بودر شستشو شود و یا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و بودر برای نظافت استفاده شود .	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و بودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده

نام بخش: دیالیز		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده سایاسپت HP، سایا سپت اچ ای، توربو، دستمال نظیف، آب شیرین، نانو سیل D6، قرص زاوول پارت، ظرف مدرج و دیش	
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار
سطوح (در، دیوار و)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪	دستگیره در بها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید
مخزن مانومتر	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
ساکشن	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول وایتکس ۱۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه غوطه م یگردد سپس آبکشی و یا استفاده از یک قرص زاوول پارت در ۱۰ الیتر آب	بلافاصله پس از استفاده محتویات بایستی داخل کاسه توالت یا سینک مخصوص مواد زائد تخلیه گردد.
وسایل یک (پنس - قیچی و ۰۰)	بحرانی	ابتدا با آب و دتر جنت شسته و سپس در محلول Intermediate مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی	بلافاصله پس از استفاده
تیغه لارنکوسکوپ	بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربو دستمال کشی	بلافاصله پس از استفاده
اتوسکوپ	غیر بحرانی	با محلول آماده به مصرف توربو تمیز شود	بلافاصله پس از استفاده
کاف فشار سنج گوشی معاینه	غیر بحرانی	گوشی معاینه و ضمام آن با اسپری سریع الاثر توربو دستمال کشی گردد	پس از استفاده
ماسک آموبک	نیمه بحرانی	ابتدا با آب و شوینده آنزیماتیک شسته و سپس در محلول High level به مدت ۱۵ دقیقه غوطه ور و آبکشی شده سپس جایگاه آن با توربو دستمال کشی.	پس از استفاده
ماشین دیالیز	بحرانی	طبق دستور سازنده دستگاه و سطوح خارجی با سایاسپت اچ پی ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	بلافاصله پس از هر بار استفاده
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با بودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	در هر شیفت
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و بودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد . فاموکلین ۴٪	در هر شیفت
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت ۲٪ HP فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و بودر شستشو شود و یا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و بودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده
توالت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و بودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گند زدایی شود	پس از استفاده

نام واحد: آزمایشگاه				
تجهیزات مورد نیاز: کندز دایی کننده. سایاسپت HP، توربو (سورفیس)، دستمال نظیف، فامو کلین، آب شیرین، قرص زاوول بارت، ظرف مدرج				
وسیله یا تجهیزات	سطح خطر	روش روئین کندز دایی	زمان کندز دایی	ملاحظات
سطوح (در، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	دستگیره در بها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	ابتدا واشینگ مطابق دستورالعمل و در صورت وجود آلودگی خونی و ... بلافاصله مطابق دستورالعمل کندز دایی شود.
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه	
لوله های آزمایشگاهی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو شود و با وایتکس ۱۰٪ کندز دایی گردد	پس از استفاده	
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	در صورت آلوده شدن ترالی ابتدا آنرا تمیز و اچ پی ۲٪ برای کندز دایی استفاده کنید.
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	در صورت وجود آلودگی ابتدا پاکسازی و یا شستشوی و سپس کندز دایی شود
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرتی را با پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ یا فاموکلین ۴٪ ویا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	بلافاصله پس از هر بار استفاده	نخ تی به صورت ۲ هفته یکبار تعویض شود
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و کندز دایی با محلول اچ پی ۲ درصد یا فاموکلین ۴٪	در هر شیفت	
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت ۲% HP یا فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه	
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو شود و با وایتکس ۱۰٪ کندز دایی گردد	پس از استفاده	
سینگ دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده	مرتباً شیر آلات سرویس بهداشتی با سرکه و ویا وایتکس ۱۰ درصد کندز دایی گردد
توالیت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد کندز دایی شود	پس از استفاده	

نام واحد: رادیولوژی و سونوگرافی		تجهیزات مورد نیاز: گندزدایی کننده. سایاسپت HP، توربو (سورفیس)، دستمال تنظیف، فاموکلین، آب شیرین، قرص ژاول پارت، ظرف مدرج		
وسیله یا تجهیزات	سطح خطر	روش روئین گندزدایی	زمان گندزدایی	ملاحظات
سطوح (در، دیوار و ...)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	دستگیره در بها روزانه و دیوارها بصورت هفتگی	ابتدا واشینگ مطابق دستورالعمل و در صورت وجود آلودگی خونی و ... بلافاصله مطابق دستورالعمل گندزدایی شود.
تخت بیمار	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP 2% یا فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی و یا دستمال کشی
لاکر (کمد کنار تخت)	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP 2% یا فاموکلین ۴٪	بلافاصله پس از ترخیص بیمار	پس از شستشوی و یا دستمال کشی
ظرف مایع دستشویی	غیر بحرانی	شستشوی ظرف مایع صابون و خشک کردن آن	بلافاصله پس از اتمام مایع و قبل از ریختن مایع جدید	
مانیتور	غیر بحرانی	با استفاده از دستمال نیمه مرطوب و سایر قسمت ها با اچ پی ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه	
ترالی دارو	غیر بحرانی	دستمال کشی با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪	روزانه قبل از شروع کار	در صورت آلوده شدن ترالی ابتدا آنرا تمیز و اچ پی ۲٪ برای گندزدایی استفاده کنید.
صندلی	غیر بحرانی	با سایاسپت HP ۲٪ یا فاموکلین ۴٪ دستمال کشی شود	روزانه	در صورت وجود آلودگی ابتدا پاکسازی و یا شستشوی و سپس گندزدایی شود
تی (زمین شوی)	غیر بحرانی	سرنی رابا پودر شسته سپس در محلول اچ پی ۲٪ یا فاموکلین ۴٪ و یا وایتکس ۲ درصد غوطه ور شود.	بلافاصله پس از هر بار استفاده	نخ تی به صورت ۲ هفته یکبار تعویض شود
کف زمین	غیر بحرانی	شستشوی با آب و پودر و گندزدایی با محلول اچ پی ۲ درصد یا فاموکلین ۴٪	در هر شیفت	
برانکارد و ویلچر	غیر بحرانی	محلول سایاسپت HP 2% یا فاموکلین ۴٪ سطح آغشته کرده و دستمال کشی و ضد عفونی گردد	روزانه	
وان حمام - روشویی	غیر بحرانی	با آب و پودر شستشو شود و یا وایتکس ۱۰٪ گندزدایی گردد	پس از استفاده	
سینک دستشویی	غیر بحرانی	از محلول وایتکس و پودر برای نظافت استفاده شود.	پس از استفاده	مرتباً شیر آلات سرویس بهداشتی با سرکه و ویا وایتکس ۱۰ درصد گندزدایی گردد
توالیت فرنگی	غیر بحرانی	ابتدا با آب گرم و پودر شسته و سپس خشک و قسمت نشیمن با وایتکس ۱۰ درصد گندزدایی شود	پس از استفاده	